

128153ES/01.13

Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar su nuevo Streamer



Contenido de la caja del Streamer Pro

La caja del Streamer consta de los siguientes elementos:



Su nuevo Streamer Pro



Gamuza



Cordón para el cuello- mediano



Cordón para el cuello - largo



Caja 1



Introducción



Instrucciones de uso



*Opcional

Caja 3

Base de carga (ver la pág. 23 de las instrucciones de uso)



Caja 4

Funda protectora (ver pág.62 en las instrucciones de uso)



Caja 2

Cable USB para carga a través de otro dispositivo (por ejemplo, un ordenador)



Mini conector estéreo de 3,5mm para MP3/música (ver pág. 50 en las instrucciones de uso)

Cable de audio de 3,5mm para utilizar con el ordenador (ver la pág. 50)



Introducción


Gracias por haber elegido nuestro producto como medio para mejorar su audición.

El Streamer le permite utilizar distintas soluciones de conectividad adaptadas a los audífonos Oticon, todas ellas pensadas para mejorar su vida diaria.

Para más información, funciones adicionales y funciones más avanzadas, consulte las instrucciones de uso y la documentación suministrada, o la documentación en línea que incluye vídeos informativos:

www.oticon.es/connectline

Cómo ponerse el Streamer

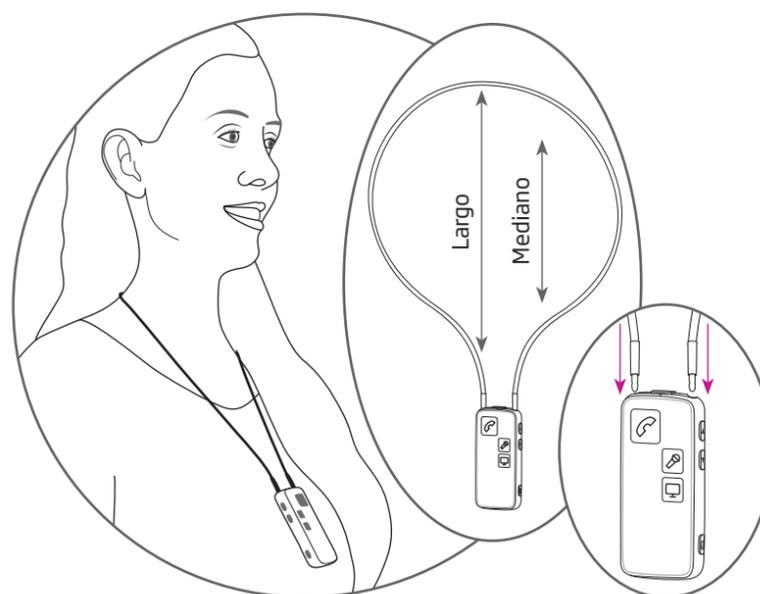


El cordón para el cuello es una parte integral del sistema electrónico del Streamer. Funciona como una antena para transmitir el sonido a sus audífonos.

Para recibir un sonido óptimo y alargar al máximo la duración de la batería, el Streamer debe llevarse siempre colgado del cuello con uno de los cordones que se suministran, tal y como se muestra en la figura de más arriba.

Más información: pág. 16 de las instrucciones de uso.

Carga del Streamer

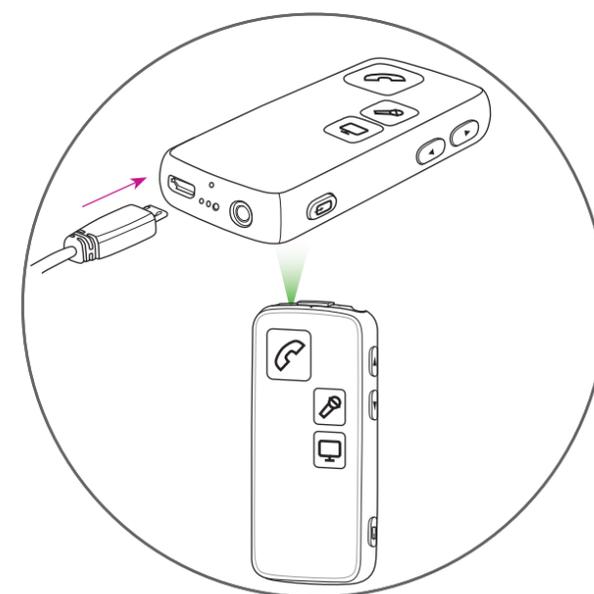

Inserte el cable del cargador suministrado en la toma micro USB de la parte inferior del Streamer.


Durante el proceso de carga, el indicador verde de la parte superior del Streamer parpadea.

Le recomendamos que cargue el Streamer a diario, por ejemplo, todas las noches.

Más información: página 22 de las instrucciones de uso.

Encender

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante aprox. 2 segundos hasta que todas las luces delanteras se enciendan y el indicador de encendido/apagado situado en la parte superior se ilumine en verde.

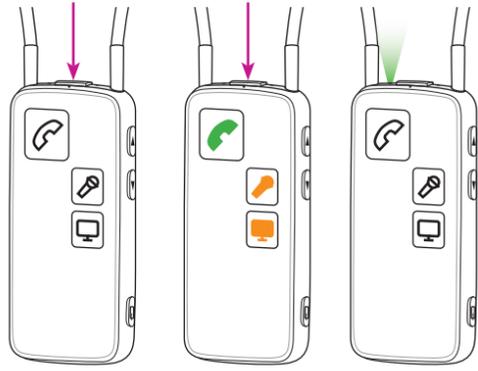

Más información: página 20 de las instrucciones de uso.


Apagar

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante aprox. 2 segundos hasta que el indicador verde de encendido/apagado se apague.

Emparejamiento del Streamer

Para que el Streamer pueda trabajar con otros dispositivos (por ejemplo, con un teléfono móvil), primero es preciso llevar a cabo un proceso llamado emparejamiento.

Ponga el Streamer en modo de emparejamiento. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante aprox. 5 segundos hasta que el indicador de encendido/apagado se ponga azul y empiece a parpadear. Cuando el indicador de encendido/apagado se ilumina en azul fijo, el emparejamiento se ha realizado con éxito. Tanto el Streamer como el teléfono móvil (por ejemplo) tienen que estar en modo de emparejamiento. El código PIN del Streamer (si lo solicita el teléfono) es 0000 (cuatro ceros).

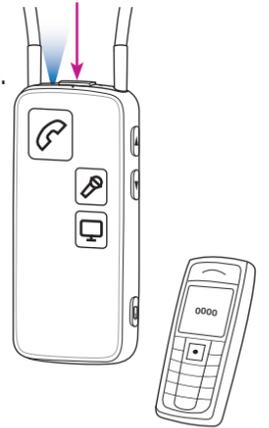

Más información: página 30 de las instrucciones de uso.

Teléfono móvil

Recibir una llamada

Cuando le suene el móvil, oirá un aviso de llamada entrante en sus audífonos. El botón de teléfono del Streamer y el indicador de estado empezarán a parpadear en verde.

Pulse el botón de teléfono brevemente para responder a la llamada.

Micrófono




Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante pulse brevemente el botón de bajar el volumen.



Hacer una llamada

Para hacer una llamada, utilice de forma normal el teléfono móvil. La llamada se transfiere automáticamente a su Streamer.

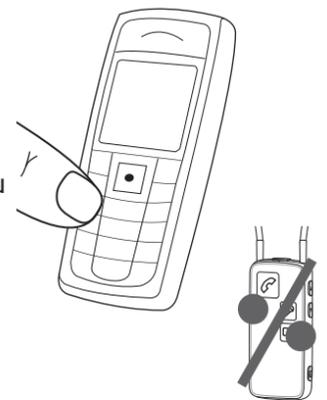

Más información: página 35 de las instrucciones de uso.

Uso del Streamer como mando a distancia de los audífonos

Cuando el Streamer no se utiliza para transmitir sonido, puede emplearse como mando a distancia de los audífonos.

Control de volumen

Pulse brevemente los botones de subir o bajar volumen

Cambiar el programa de los audífonos

Mantenga pulsado el botón subir volumen o bajar volumen para cambiar de programa


Más información: pág. 28 de las instrucciones de uso.



Música

Puede escuchar música conectando el cable provisto de mini conector a la parte inferior del Streamer, o de forma inalámbrica mediante Bluetooth.

Para seleccionar la música pulse brevemente el selector AUX.

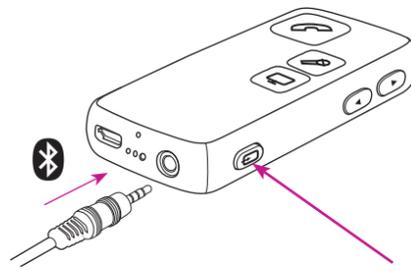


Más información: página 50 de las instrucciones de uso.

Bobina de inducción

Streamer tiene un receptor de bucle de inducción incorporado (bobina de inducción).

Para recibir el sonido de la bobina, mantenga pulsado el selector AUX durante aprox. 2 segundos.

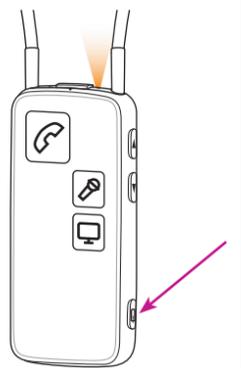

Más información: página 56 de las instrucciones de uso.


Solución para teléfono

Nota: requiere equipo adicional.

Permite utilizar el Streamer con un teléfono fijo analógico tradicional.

Para aceptar una llamada, pulse el botón de teléfono brevemente.

Más información:
www.oticon.com/phone

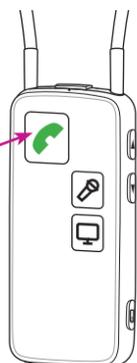

Solución para televisión

Nota: requiere equipo adicional.

Permite transmitir el sonido de un televisor a sus audífonos a través del Streamer.

Pulse el botón TV brevemente para activar la transmisión del sonido de la televisión.

Más información:
www.oticon.com/tv



Micrófono ConnectLine

Nota: requiere equipo adicional.

Permite transmitir el sonido de un interlocutor concreto a sus audífonos mediante el Streamer.

Pulse el botón de micrófono brevemente para activar el micrófono.

Más información:
www.oticon.com/mic

