

Introducción a Amigo Star y los Transmisores FM T30/T31



Amigo T30/T31

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Indicador LED | 6 Navegación del menú |
| 2 Encender/Apagar/Silenciar | 7 Micrófono de solapa |
| 3 Conector para micrófono | 8 Cargador |
| 4 Borrar los valores introducidos ("C") | 9 Entrada AUX |
| 5 Sincronizar receptor/Intro | |

Amigo Star

- | |
|---------------------------------------|
| 1 Rueda de C. Volumen |
| 2 Indicador LED |
| 3 Pulsador búsqueda de canales |

Programar el transmisor T30/T31



Los transmisores FM de Amigo T30 y T31 se pueden llevar con el colgador alrededor del cuello o sujetos a la ropa con el clip. Cualquiera de estos dos transmisores sirve de unidad de programación de Amigo Star y no requiere ningún otro dispositivo.

- 1 Introducir pila en el T30/T31 y encender el transmisor.

Acceder a los menús de programación

Pulsar el botón "C" y el botón de encendido simultáneamente para acceder a los menús de programación.

Hay 3 menús principales que se acceden desde el Menú de adaptación.

Ver/Programa Transmisor
Ver/Programa Receptor
Asistente de canales FM

Utilice los botones ▲▼ para navegar. Utilice  para seleccionar. Utilice ◀ para volver al menú principal. Para salir del Menú de programación, presione simultáneamente el botón "C" y el botón encender/apagar.

Conectar el tubo Corda² y el cono al receptor Amigo Star



- 1 **Seleccionar el tubo Corda² adecuado.**

El tamaño del tubo aparece en letras azules (izquierdo) o en letras rojas (derecho) al final del mismo tubo.

La mayoría de los niños utilizarán el tubo más pequeño marcado 0-0.9.

Conectar el tubo a Amigo Star.

- 2 **Seleccionar el cono para Corda² adecuado** y conectarlo al tubo. La mayoría de los niños utilizarán el cono más pequeño.

- 3 **Insertar una pila al receptor Amigo Star,** cerrar el portapilas y girar la rueda de volumen hasta una posición superior al 1.

Utilizar el sistema

Si no está encendido el indicador LED, presione  para sincronizar. El indicador LED se iluminará para indicar que Amigo Star está recibiendo la señal del habla desde el transmisor. El sistema está preparado para su uso.



2 Ajustar canales en el transmisor:


Ir al menú del Asistente de canales FM. Utilizar ► para Escanear y Seleccionar Ajuste de Canal. Se probarán y evaluarán todos los canales disponibles para encontrar el mejor canal. Utilizar ◀ para salir y guardar el nuevo canal seleccionado.



3 Programar Amigo Star:

Sujetar Amigo Star y el transmisor como aparecen en la imagen. La orientación de los dos dispositivos es importante para la comunicación entre ambos.

Ir al menú Programar receptor.

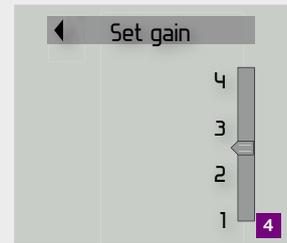

4 Desactivar la rueda de control de volumen (opcional)

Para usuarios muy jóvenes o usuarios con dificultades de aprendizaje, la rueda del control de volumen se puede desactivar.

Si se desactiva el control de volumen, la ganancia se ajusta con el transmisor. Esta ganancia será la que sale por defecto.

Los números del control de volumen corresponden con los que aparecen en la pantalla.

Colocar Amigo Star en el oído



Una vez conectados el tubo Corda² y el cono correctos y programado, está preparado para colocarse en el oído.

- 1 Colocar Amigo Star detrás de la oreja
- 2 Posicionar el cono en el canal auditivo y ajustar el hilo de sujeción en el pabellón de la oreja.
- 3 Suavemente empuje el tubo fino Corda² dentro del oído

Llevar el transmisor T30/T31



- 1 Sujetar el transmisor T30/T31 con el clip para cinturón
- 2 Utilizar el clip del micrófono de solapa para engancharlo a su ropa. El micrófono debe estar a una distancia de 10-15 cm de la boca (la fuente de sonido).
- 3 Utilizar el micrófono boom
El micrófono boom es una alternativa al micrófono de solapa. Se coloca el micrófono alrededor de la oreja y se ajusta el alambre para que el micrófono quede a una distancia de 1 - 5 cm de la boca.

Problema

Sin alimentación/ el indicador LED del transmisor Amigo no está encendido

Mensaje de Receptor fuera de cobertura

Indicador LED del Amigo T30/T31 en verde intermitente

Alumno no oye la señal

Alumno nota interferencias/estática en la señal

Solución

Revisar, cambiar o cargar la batería
Nota: Amigo T30/T31 admite pilas AA

Asegurar que Amigo Star está a una distancia de 1-35 cm del transmisor al programarse

Sujetar Amigo Star y el transmisor de la manera indicada en la página 3

Revisar, cambiar o cargar la batería del Amigo T30/T31

Revisar o cambiar la batería de Amigo Star

Indica batería baja - cargar Amigo o insertar pilas AA nuevas

Revisar la conexión del micrófono

¿Está en modo silencio el transmisor Amigo T30/T31? (¿El indicador LED aparece en rojo intermitente?)

¿Está encendido el transmisor Amigo T30/T31? (¿El indicador LED aparece en rojo fijo?)

Revisar el indicador LED de Amigo Star. ¿Aparece en rojo intermitente o fijo?

Limpiar o cambiar el tubo fino Corda² y cono de Amigo Star

Verificar que Amigo Star está en el mismo canal que el transmisor T30/T31. Presionar el botón  para sincronizar.

Asegurar que el cable del micrófono está conectado correctamente al T31, que no esté ligeramente torcido.

Revisar o cambiar de canal con el botón subir/bajar de canal