




Audífono BTE con codo

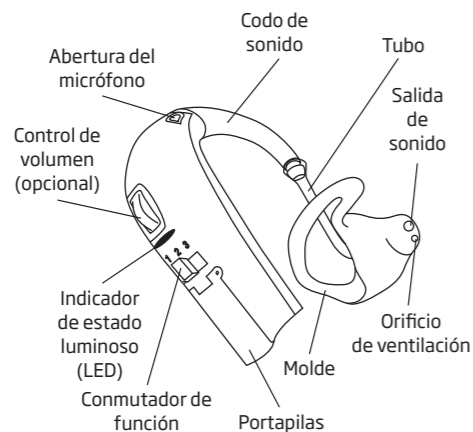

Tamaño de la pila: 675

Activar el audífono por primera vez

Un audífono es un equipo electrónico muy pequeño que utiliza pilas especiales. Para activarlo, es preciso colocar una pila nueva en el portapilas.

Para encender el audífono, cierre el portapilas por completo con la pila dentro. Tardará unos segundos antes de emitir sonido. Durante el proceso de encendido, sonará una melodía. En cuanto cierre el portapilas, puede colocarse el audífono en el oído.

Si tiene el audífono en la mano mientras lo activa, se puede producir un pitido que desaparecerá en cuanto se lo coloque correctamente en el oído.

NOTA IMPORTANTE

Familiarícese con este manual de instrucciones y con las instrucciones de uso antes de utilizar su audífono. Contiene instrucciones de seguridad e importante información sobre el uso y manejo de su audífono y de las pilas.

ATENCIÓN

Sumo DM es un audífono potente. Si usted lo utiliza, nunca permita que otras personas se lo coloquen ya que un uso incorrecto del mismo, podría causarles un daño permanente en los oídos.

Encendido (ON) y apagado (OFF) del audífono

Cuando encienda su audífono (ON) compruebe que:

1. El portapilas esté cerrado
2. El control de volumen esté encendido
3. El conmutador de función esté ajustado a un programa de micrófono.

Cuando el audífono esté encendido oírás una serie de avisos para indicar que el programa está activo, y que la pila está funcionando.

El diodo (LED) parpadeará para indicar que el audífono está encendido o se quedará de forma fija dependiendo de la configuración.

Cuando apague su audífono (OFF), puede utilizar una de las siguientes opciones:

1. Girar el control de volumen hacia abajo hasta que note un clic
2. Ajustar el conmutador de funciones en OFF si se ha programado con una posición OFF
3. Abrir ligeramente el portapilas.

Para ahorrar pila, asegúrese de que su audífono esté apagado cuando no lo lleve puesto.

Sustitución de la pila

Su audífono utiliza una pila tipo 675. Las pilas gastadas deben cambiarse inmediatamente y eliminarse siguiendo la normativa local.

Cuando la pila se acabe, oírás una serie de avisos cortos.

Si la luz de estado está programada para permanecer encendida, se apagará. Esto indica que debe cambiar la pila y no que el audífono funcione mal.

Para cambiar la pila siga estas instrucciones:

- Abra el portapilas moviendo hacia atrás el borde que queda levantado y extraiga la pila usada.
- Retire el adhesivo del lado + de la pila
- Introduzca la nueva pila (tamaño 675, preferentemente pila especial para audífonos super potentes) de forma que el signo + de la pila coincida con el signo + grabado en el interior del portapilas.
- El portapilas debe cerrarse con facilidad. Si nota alguna resistencia puede ser que haya insertado la pila incorrectamente. Reinserte la e inténtelo de nuevo.

Si la pila presenta restos de humedad, debe limpiarse antes de su utilización. Cuando cambie la pila, tenga en cuenta que puede tardar algunos segundos en funcionar con normalidad.

NOTA IMPORTANTE

Cuando no esté usando el audífono, y especialmente por la noche, abra por completo el portapilas para permitir que circule el aire.


Indicador Izquierdo / Derecho

Los audífonos se ajustan dependiendo de cada oído, lo que quiere decir que si usted necesita dos audífonos, el izquierdo se programará de forma diferente del derecho. Por eso es tan importante distinguir entre ambos.

Para identificar fácilmente si su audífono corresponde al oído izquierdo o al derecho, se pueden colocar indicadores de color en el interior de la tapa para la batería.


Un indicador azul marca el audífono **IZQUIERDO**.

Un indicador rojo marca el audífono **DERECHO**.

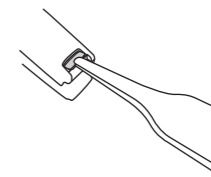


Colocación de audífonos con molde


Introduzca el extremo del molde en su conducto auditivo, haciéndolo girar ligeramente hasta que la parte superior del molde (A) alcance la parte trasera del pliegue de su oreja (B).

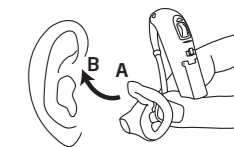

Tírese suavemente de la oreja y presione el molde hacia el interior del conducto auditivo.

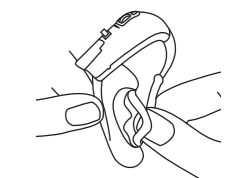


Cuando el molde esté correctamente posicionado, colóquese el audífono detrás de la oreja, levantándolo por su parte inferior y pasándolo por encima de la oreja.

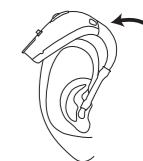

Conmutador de función

Su audífono tiene un conmutador de 3 posiciones para cambiar entre los diferentes programas.

- Al cambiar entre los diferentes programas, su audífono le avisará.
- Para activar el programa al que cambia presione el conmutador. El número de avisos indica qué programa está usando si los avisos no están activados.

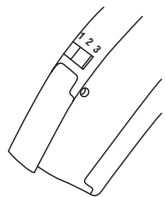

Programas (opcional)

Su audífono puede tener hasta 3 programas.

Su audioprotesista se encargará de instalar el número y tipo de programas adecuados a su audífono.

Por favor, tenga en cuenta de que un programa puede programarse como posición off (opcional).

	Un tono, al cambiar al programa 1
	Dos tonos, al cambiar al programa 2
	Tres tonos, al cambiar al programa 3

Control de volumen (opcional)

La rueda del volumen se puede activar. Le permite ajustar el volumen en situaciones específicas hasta el nivel con el que usted se sienta cómodo.

El nivel de control de sonido preferido puede indicarse mediante tres avisos sonoros. Este nivel ha sido programado teniendo en cuenta sus preferencias. Consulte a su audioprotesista si encuentra que este nivel es demasiado fuerte o demasiado suave en la mayoría de las situaciones.


La rueda de volumen tiene marcados los números 1, 2, 3 y 4 así como una posición 'click'.

Al subir la rueda aumenta el volumen. El ajuste máximo (4) le proporciona el sonido más alto.

Al bajar la rueda desciende el volumen. El ajuste mínimo (1) le proporciona el sonido más bajo.

Si gira el control por debajo de (1) notará un pequeño clic y el audífono se apagará.

Su Control de Volumen puede desactivarse si no desea utilizarlo. Esto también puede desactivar la función de apagado en el Control de Volumen.

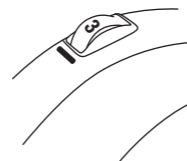

Bobina de inducción (opcional)

La bobina de inducción es un receptor de señales de audio transmitidas desde un sistema de bucle de inducción. Se emplea para hablar por teléfono* y para recibir sonido de sistemas en bucle, por ejemplo en teatros, iglesias o salas de conferencias.

La bobina se activa mediante el pulsador, exactamente igual que los cambios de programa. Cuando active la bobina, escuchará un cierto número de tonos, correspondientes al programa de bobina de inducción.

Consulte la sección "Descripción de los programas" en la última página de este manual para ver dónde se encuentra el programa de bobina de inducción.



El logotipo de la derecha es el símbolo universal de las ayudas técnicas a la audición. La "T" indica que se encuentra disponible un sistema compatible con bobinas de inducción.


* Requiere un teléfono con bobina incorporada. La bobina es una ayuda técnica estándar común que transmite el sonido a la bobina de inducción del audífono.

Portapilas de seguridad (opcional)

Para mantener la pila fuera del alcance de bebés, niños y personas con dificultades de aprendizaje, utilice un portapilas de seguridad.

Instrucciones:

para quitar la pila, abra el portapilas. (Si lleva DAI, debe quitarse el zócalo). Inserte la pila de un bolígrafo u otro objeto similar en el orificio, presione la pila con la punta del bolígrafo hasta que se salga.

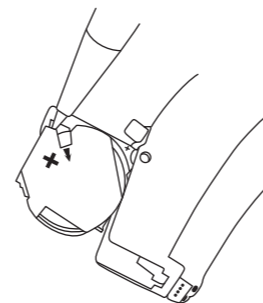

NOTA IMPORTANTE

No fuerce el portapilas más allá de su apertura total. Introduzca la pila correctamente. El portapilas puede deformarse en caso de forzarlo en exceso, por lo que se limitaría su función de seguridad.

Vista general de los ajustes del audífono

Descripción de los programas

Núm. 1	
Núm. 2	
Núm. 3	